

Norbuprenorfin	180	Buprenorfin	10
Buprenorfin-3-β-D-glukuronid	100	Norbuprenorfin-3-β-D-glukuronid	600
6-MONOACETYLMORFIN(6-MAM 3)			
6-monoacetylmorfin	3	Diacetylmorfin(herion)	10
6-MONOACETYLMORFIN(6-MAM 5)			
6-monoacetylmorfin	5	Diacetylmorfin(herion)	15
6-MONOACETYLMORFIN(6-MAM10)			
6-monoacetylmorfin	10	Diacetylmorfin(herion)	25
TRAMADOL(TML30)			
Cis-tramadol	30	n-Desmetyl-cis-tramadol	15
Procyklidin	3,000	Fencyklidin	6,000
d,l-O-desmetylvlenlafaxin	15,000	o-Desmetyl-cis-tramadol	1 500
TRAMADOL(TML50)			
Cis-tramadol	50	n-Desmetyl-cis-tramadol	25
Procyklidin	5,000	Fencyklidin	10,000
d,l-O-desmetylvlenlafaxin	25,000	o-Desmetyl-cis-tramadol	2 500
FENTANYL(FYL10)			
Fentanyl	10	Norfentanyl	4
Perfenazin	20,000		
SYNTEISK MARIJUANA (K2 25)			
JWH-018 5-pentansyra	25	MAM2201 N-pentansyra	35
JWH-073 4-butansyra	25	JWH-210 N-5-karboxypentyl	210
JWH-018 4-hydroxipentyl	210	JWH-398 N-pentansyra	175
JWH-018 5-hydroxipentyl	300	JWH-200 6-hydroxiindol	300
JWH-073 4-hydroxibutyl	170	JWH-073 N-2-hydroxibutyl	500
JWH-018 N-propansyra	20	JWH-019 5-hydroxihexyl	500
JWH-019 6-hydroxihexyl	500	JWH-018	42,000
JWH-122 N-4-hydroxipentyl	500	AM2201 N-(4-hydroxipentyl)	350
RCS4 N-5-karboxypentyl	22,500	JWH-073 N-(3-hydroxibutyl)	225
SYNTEISK MARIJUANA (SMA30)			
JWH-018 5-pentansyra	30	MAM2201 N-pentansyra	45
JWH-073 4-butansyra	30	JWH-210 N-5-karboxypentyl	300
JWH-018 4-hydroxipentyl	300	JWH-398 N-pentansyra	210
JWH-018 5-hydroxipentyl	350	JWH-200 6-hydroxiindol	360
JWH-073 4-hydroxibutyl	200	JWH-073 N-2-hydroxibutyl	600
JWH-018 N-propansyra	25	JWH-019 5-hydroxihexyl	600
JWH-019 6-hydroxihexyl	600	JWH-018	50,000
JWH-122 N-4-hydroxipentyl	600	AM2201 N-(4-hydroxipentyl)	420
RCS4 N-5-karboxypentyl	27,000	JWH-073 N-(3-hydroxibutyl)	270
AB-Pinaca (K2+ 10)			
AB-PINACA pentansyrametabolit	10	AB-PINACA N-(4-hydroxipentyl)metabolit	10
ADB-PINACA N-(4-hydroxipentyl)metabolit	15	ADB-PINACA N-(5-hydroxipentyl)metabolit	20
5-fluor AB-PINACA N-(4-hydroxipentyl)	20	ADB-PINACA pentansyrametabolit	20
AB-PINACA N-(5-hydroxipentyl) metabolit	30	5-fluor AB-PINACA	50
AB-PINACA	100	AB-FUBINACA	150
5-fluor ADB-PINACA	250	5-klor AB-PINACA	1000
ZOPIKLON(ZOP20)			
Zopiklon	20		

Korsreaktivitet

En studie genomfördes för att fastställa korsreaktiviteten hos testet med föreningar spetsade i läkemedelsfritt PBS-lager. Följande föreningar visade inga falskt positiva resultat på Multi-Drug Rapid Test Cassette när de testades med koncentrationer upp till 100 µg/ml.








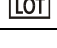
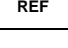

Paracetamol	Dextrometofan	Isoxsuprine	β-fenyletylamin
Aceton	Diklofenak	Kanamycin	Kanamycin Prokain
Acetofenetidin	Dicyklin	Ketoprofen	Prometazin
Aspirin	Diffunisal	Labetalol	Quinacrine (Quinacrine)
Albumin	Digoxin	Lidokain	Kinidin
Amoxapin	4-dimetylaminoantipyrin	Lindan	Ranitidin
Amoxicillin	Difenhydramin	Loperamid	Riboflavin
Ampicillin	5,5-difenylhydantoin	Meperidin	Koksalt
Askorbinsyra	Disopyramid	Metoxifenamin	Sulfamethazin
Aspartam	Doxylamin	Metoprolol	Sulindac Sulindac
Atropin	Dopamin	Nalidixinsyra	Temazepam
Bensoesyra	(1R, 2S) - (-)-efedrin	(+)-Naproxen	Tetracyklin
Bilirubin	Erytromycin	Nimesulide	Tetrahydrozolin
(+/-) Bromfeniramin	Etanol (utom ALC)	Noretindron	Thebaine


Bensokain	Etodolac	Noskapin	Teofyllin
Buspiron	Famprofazone	Niacinamide	Tiamin
Koffein	Fenoprofen	Nofedrin	Tioridazin
Kloramfenikol	Fluoxetinhydroklorid	Orfenadrin	Tolbutamid
Klorokin	Furosemid	Oxalsyra	Trazodon
(+/-)-klorfeniramin	Gentisinsyra	Oxolinsyra	Triamteren
S- (+)-klorfeniraminmaleat salt	D (+) glukos	Oxymetazolin	Trifluoperazin
Klorpromazin	Guaiacol glyceryleter	Papaverine	Trimetoprim
Klorprotixen	Hemoglobin	Pemolin	Trimipramin
Cimetidin	Hydralazin	Penicillin-G	Tryptamin
Klomipramin	Hydrochlorothiazide	Perfenazin	Tyramin
Klonidin	Hydroxizin	Fenelzine	Urinsyra
Kreatin	Imipramin	Feniramin	Verapamil
Cyklobensaprin	Isoproterenolhydroklorid	Fentiazin	Zomepirac Zomepirac

[BIBLIOGRAFI]

- Moolchan, E., et al, "Saliv and Plasma Testing for Drugs of Abuse: Comparison of the Disposition and Pharmacological Effects of Cocaine", Addiction Research Center, IRP, NIDA, NIH, Baltimore, MD. I enlighet med vad som lades fram vid SOFT-TIAFT-mötet i oktober 1998.
- Kim, I, et al, "Plasma och oral vätska farmakokinetik och farmakodynamik efter oral kodeinadministrering", *ClinChem*, 2002 Sept.; 48 (9), s. 1486-96.
- Schramm, W. et al, "Drugs of Abuse in Saliva: A Review", *J Anal Tox*, 1992 jan-feb; 16 (1), sidorna 1-9
- McCarron, MM, et al, "Detekning av fencyklidinanvändning genom radioimmunanalys av saliv," *J Anal Tox*. 1984 sep-okt.; 8 (5), s. 197-201.

Index of Symbols

	Se bruksanvisning		Tests per kit		EU Auktoriserad representant
	Endast för diagnostisk användning in vitro		Utgångsdatum		Återanvänd ej
	Förvara mellan 2–30 °C		Lotnummer		Katalognummer
	Använd inte produkten om förpackningen är skadad				

 Hangzhou Biotest Biotech Co., Ltd.
17#, Futai Road, Zhongtai Street,
Yuhang District, Hangzhou, P. R. China





Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80,
20537 Hamburg, Germany

Imported by Noviral Sweden AB, a Novir partner.

Kontakta oss: info@noviral.se
+46 (0)10-880 08 47
Noviral Sweden AB
Humlegårdsgatan 4, 3tr
114 46 Stockholm, Sweden

Nummer: RP5577200
Ikraftträdande: 2024-04-07